

## COVID-19 Hızlı Antijen Test Kiti

### 15 dakika içinde güvenilir sonuç

- ✓ Covid-19 hızlı antijen kalitatif tespiti
- ✓ Nazofarengeal/Burun sürüntü ve PCR (VTM) örneklerinden çalışma
- ✓ Oda sıcaklığında saklama (2-30 °C)
- ✓ Klinik duyarlılığı %96,67 ve klinik özgüllük %99,2
- ✓ Almanya Paul-Ehrlich-Institut ve BfArM onaylı




## Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti

- ✓ Lateral Flow Colloidal Gold Immünoassay yöntemi
- ✓ SARS-CoV-2 nükleokapsid proteininin kalitatif tespiti
- ✓ Kullanımı kolay, herhangi bir ekipman gerektirmez




## Test Prosedür

- 1) Hastadan nazal veya nazofarengal sürüntü örneği alın. Swabı lizis buffer tüpüne yerleştirin. Tüpü sıkın ve swabı 5 kez karıştırın.
- 2) Tüpü 10 kez hafifçe sallayarak karıştırın. 1 dakika bekletin. İlk 2 damlayı dışarı atın.
- 3) Numune kuyucuğuna 3 damla numune ekleyin. Sonucu 15 dk içinde yorumlayın.

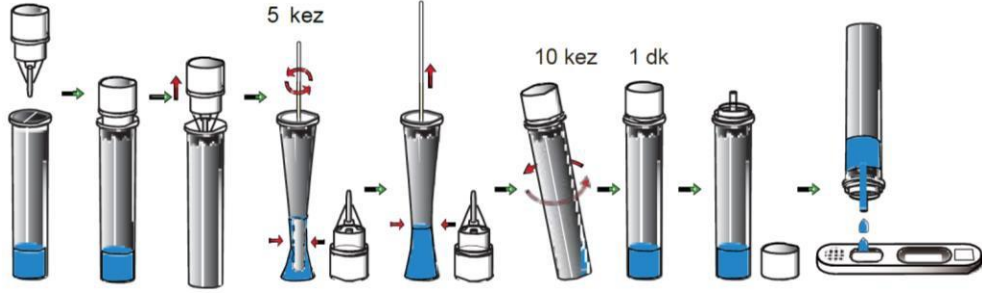

## Değerlendirme

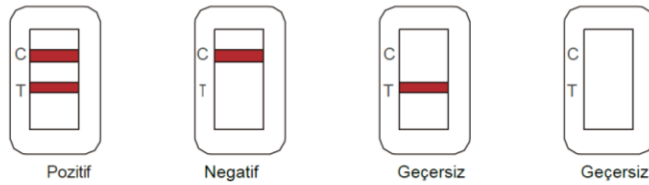

## Sipariş Bilgisi

Kodu	Ürün Adı	Miktarı	Örnek Tipi	Yeterlilik
BE0040	COVID-19 Ag Test Kit	20 Test	Nazal/Nazofarengal Sürüntü	CE